



Hyaneb® - Inhalatievloeistof voor de verwijdering van mucus (slijm) secreties

GEBRUIKSAANWIJZING

Indicatie

De verneveling van Hyaneb® verbetert de mobilisatie van mucus in de luchtwegen door een osmotisch mechanisme. Het hoge zoutgehalte trekt water aan en verbetert de bevochtiging van het mucus. Hyaneb® is speciaal geïndiceerd voor de bevordering van sputumevacuatie bij patiënten met Cystic Fibrosis en patiënten met bronchiëctasieën.

Samenstelling

Hyaneb®, hypertone inhalatieoplossing bevat 70 mg/ml natriumchloride, 1 mg/ml natriumhyaluronaat en gedestilleerd water.

Contra-indicaties

Hyaneb® is gecontra-indiceerd voor patiënten van wie bekend is dat ze overgevoelig zijn voor één van de bestanddelen.

Instructies voor gebruik

Elke willekeurige jetvernevelaar kan gebruikt worden. Voor optimaal resultaat worden *Pari* jetvernevelaars aanbevolen. Mesh vernevelaars kunnen ook gebruikt worden. Wanneer een *eFlow rapid* gebruikt wordt, is het voor optimaal gebruik, aan te bevelen om de mesh vóór gebruik te bevochtigen, door deze onder te dompelen in afgekookt gedestilleerd water. Het bevochtigen is niet nodig wanneer het apparaat net gebruikt is. Houd de vernevelkamer in de mond en adem normaal gedurende de verneveltherapie. Dit duurt ongeveer 10 minuten (afhankelijk van type vernevelaar en techniek van vernevelen). Gebruikstemperatuur vernevel de vloeistof op kamertemperatuur.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Het product alleen gebruiken voor inhalatie.
- De eerste toediening dient te geschieden onder toezicht van een arts of gekwalificeerd personeel. Het gebruik bij kinderen moet plaatsvinden onder supervisie van een volwassene.
- In gevallen van overgevoeligheid wordt geadviseerd om bij de start van de therapie luchtwegverwijders, die bronchospasmen helpen voorkomen als premedicatie, toe te dienen. Premedicatie met luchtwegverwijders dient te worden toegediend onder controle van een arts.
- Onderbreek de behandeling als er symptomen van bronchospasmen of aanhoudende hoest optreden en infomeer de behandelend specialist.
- Gebruik het product niet als de flacon beschadigd is of niet helemaal goed dicht is op het moment dat de verpakking de eerste keer wordt geopend.
- Gebruik het product niet als de houdbaarheidsdatum op de verpakking is verstreken.

Eventuele rest oplossing in de flacon mag niet opnieuw gebruikt worden.

Meng geen andere medicijnen met de hypertone vloeistof.

Dosering

Gebruik tweemaal daags een flacon van 5 ml of volgens medisch voorschrift. De behandeling kan gestart worden met een lager volume dat opgehoogd wordt.

Bewaaradvies

Bewaar op kamer temperatuur en houd buiten bereik van kinderen.



Fabrikant
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A
43122 Parma - Italy

Datum laatste herziening: Juli 2013

CE 0546

VERNEVELAPPARAAT

gebruiken tot 

Volg de  gebruiksaanwijzing

STERILE A

Eenmalig gebruik 

15  25

Gooi verpakking na gebruik in de afvalbak

